

## OSOBNÍ ZESILOVAČ ZVUKU CYBER SONIC

### Návod k použití

Před prvním použitím si pečlivě přečtěte návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí.

### Popis přístroje , Užití zesilovače zvuku

- Nastavte hlasitost na nejnižší úroveň.
- Zkontrolujte, zda je správně vložená baterie.
- Nasaďte si zesilovač na pravé či levé ucho.

POZOR - Vyberte ze 3 dodávaných hygienických koncovek takovou, která nejlépe vyhovuje vašemu uchu tak, aby ucho úplně utěsnila. Pokud zvukovod neutěsnil, může docházet k interferenci zvuků, která způsobí pískání přístroje.

Otočným Vypínačem hlasitosti přepněte do polohy zapnuto. Hlasitost nastavte na požadovanou úroveň.

### Upozornění

Zesilovač nezakrývejte (rukou apod.), mohlo by dojít k hlasitému pískání přístroje..

Zesilovač vždy vypněte (poloha OFF), pokud jej právě nepoužíváte. Zvýšíte tak životnost baterií.

### Regulace hlasitosti

Přístroj má plynulou regulaci hlasitosti. Hlasitost regulujte pomocí otočného knoflíku.

### Výměna baterií

Otevřete přihrádku pro baterii a vložte baterii

Správné nasazení zesilovače Ušní koncovku nasaďte řádně do zvukovodu.

### Upozornění

- Hlasitost zvyšujte velmi pozvolna, aby nedošlo k náhlému zvýšení hlasitosti okolních zvuků až k bolestivosti ucha.
- Tento výrobek NENÍ zdravotnickým prostředkem určeným ke kompenzaci nedoslýchavosti. O použití se poraďte s odborným lékařem.
- Výrobek udržujte mimo dosah dětí a nesvéprávných osob.
- Baterie nevhazujte do ohně.
- Baterie udržujte mimo dosah dětí.
- Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie z přístroje.
- Baterie nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte na místa zajišťující recyklaci baterií.
- Přístroj není vodotěsný a nesmí přijít do kontaktu s vodou.
- Pokud nedopatřením dojde k namočení, přístroj vypněte, vyjměte baterii a nechte oschnout.

### Technické údaje

- Životnost baterie - do 24 hodin (LR-44 1pc)
- Operační proud - <8,4mA
- Operační rozsah napětí - 1,0-1,6V